



# 醫事檢驗科公告

2019/05/16

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：更正公告編號「(108)013 糖化血色素(HbA1C)變更檢驗方法」，  
檢驗代碼應為 66104

執行日期：2019/05/16

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

說明：

## 1. 醫事檢驗科變更糖化血色素(HbA1C)檢驗方法：

	變更前	變更後
操作機台	BioRad Variant II Turbo	Capillary3 TERA HbA1C
操作原理	HPLC method	Capillary method
線性範圍	3.5%~19.0%	4.0~16.5%
報告單位	%	%
參考值	4~6 %	4~6 % 當檢驗結果小於量測區間時，以<4.0%發出結果。 當檢驗結果大於量測區間時，以>16.5%發出結果。
校正程序	Bio-Rad Calibrator is traceable to the reference method of both the NGSP and IFCC	HbA1C Calibrator is traceable to the IFCC reference system and DCCT.
操作單位	淡水醫事檢驗科 貴重儀器組	淡水醫事檢驗科 貴重儀器組

2. 檢體及容器：採集全血 3mL 置於 EDTA 紫頭管。
3. 運送條件：收集到檢體後，以室溫方式送至醫事檢驗科。
4. 收件時間：24 小時。
5. 操作時間：週一~週六，中午 12:00 以前收到的檢體。
6. 報告時間：操作日當天內發報告，國定及例假日不操作。

公告製訂：醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉