


一、檢體送檢注意事項：

- 1.送檢（轉檢）**新鮮腎臟穿刺組織3條最理想**。
- 2.若病人有特殊的 risk，則最少穿刺腎臟組織2條為佳。
- 3.檢體送檢前請先向本科索取固定液（3瓶/一組）：以利檢體固定品質，提高診斷正確率。
 - （1）電顯固定液（EM）：冰箱 4°C 保存。
 - （2）Amonium sulfate 固定液（IF）：室溫保存（不可放在冰箱冰存）。
 - （3）福馬林固定液（LM）：室溫保存。
- 4.請依第二項檢體處理方式**自行【前處理】**，**室溫保存（不需冰塊保存）**，**以郵局限時掛號或快遞傳送即可**。
- 5.檢體**送檢前請先以電話聯絡**，以確保檢體之安全與品質。

二、檢體【前處理】方式：


1.標準處理方法（三條組織）（Specimen Allocation for 3 Cores）：

- （1）第一條腎臟穿刺組織做電顯（EM）檢查，請立即放入電顯液瓶中固定。
- （2）第二條腎臟穿刺組織做免疫螢光染色（IF）檢查，請立即放入 Amonium sulfate 溶液瓶中保存。
- （3）第三條腎臟穿刺組織做石蠟切片（LM）檢查，請立即放入福馬林液瓶中固定。

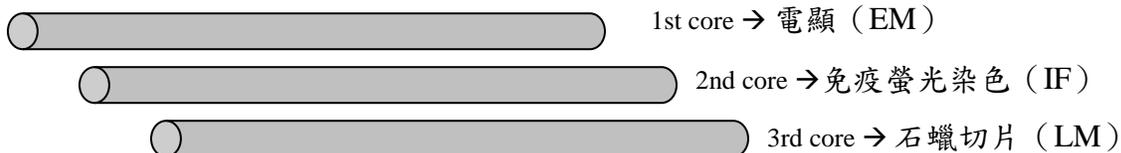

2.特殊狀況處理方法：兩條組織（Specimen Allocation for 2 Cores）：

- （1）兩端腎臟穿刺組織做電顯（EM）檢查，請立即放入電顯液瓶中固定。
- （2）其餘腎臟穿刺組織，請各切取 1/3 立即放入 Amonium sulfate 溶液瓶中做免疫螢光染色（IF）檢查、2/3 立即放入福馬林液瓶中做石蠟切片（LM）檢查。

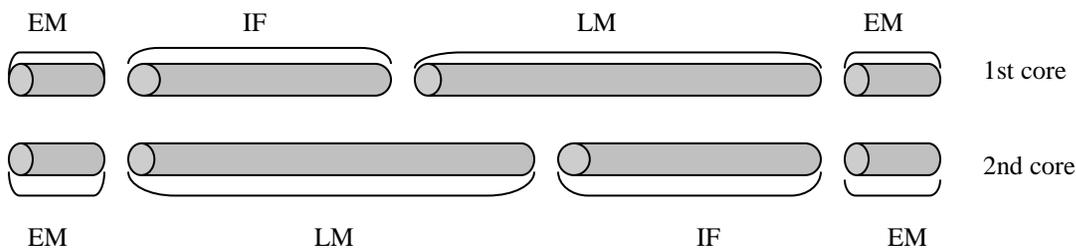

三、郵寄地址：【**限時掛號或快遞**】

台北縣淡水鎮民生里民生路 45 號（病理科）

馬偕紀念醫院病理科切片組收（上班時間 AM8:00-PM4:30）

- ## 四、聯絡電話：
- （02）28094661 轉 2493 或 2497 切片組（淡水院區）
（02）25433535 轉 2896 或 2897 細胞室（台北院區）

文件編號/名稱	機密等級	生效日	版本	頁次
MMH-DMS-4-3582-046-1-P 病理科腎臟切片送檢處理方法及注意事項	一般	2022.08.01	03	1 / 1