

免疫螢光固定液(IF)
保存方法：室溫
※ 不可 4-6°C 保存

福馬林固定液(LM)
保存方法：室溫


電顯固定液(EM)
保存方法：冰箱 4-6°C

固定液保存暨使用說明：

1. 固定液 (3 瓶 /一組)：

- (1) 免疫螢光固定液 (IF)：室溫保存。 (不可放在冰箱冰存)
- (2) 福馬林固定液 (LM)：室溫保存。
- (3) 電顯固定液 (EM)：冰箱 4-6°C 保存。

2. 標準【前處理】方法 (三條組織) (Specimen Allocation for 3 Cores)：

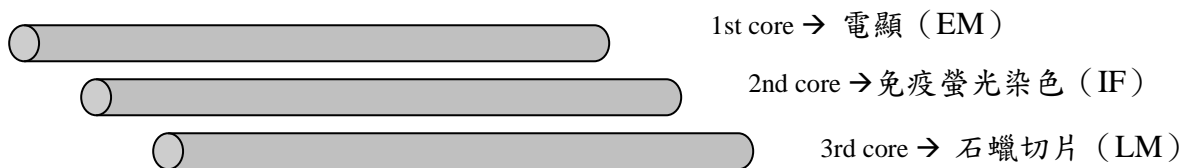

3. 檢體傳送：室溫保存 (不需冰塊保存)，以郵局限時掛號或快遞傳送即可。

4. 郵寄地址：台北縣淡水鎮民生里民生路 45 號 (病理科)

馬偕紀念醫院病理科切片組收 (上班時間 AM8:00-PM4:30)

文件編號/名稱	機密等級	生效日	版本	頁次
MMH-DMS-4-3582-046-2-P 病理科腎臟切片固定液保存暨使用說明	一般	2022.08.01	03	1 / 1